

アクアフレンズが水を変える。
アルカリイオン水が健康な毎日の暮らしに。



2wayタイプ

1wayタイプ

5種の水がたっぷり使える満足感。

アルカリイオン水

健康の水

アルカリイオン水は、飲用水とお料理をおいしくします。

- お茶・コーヒー・紅茶に
- 炊飯に
- アクの強い野菜のアク抜きに
- 煮物料理に
- 焼酎・ウイスキーなどの水割りに



浄水

安心の水

薬の服用時や、ミルクづくりに。

- 残留塩素や臭気・サビ・有害物質などを除去した浄水
- 薬の服用に
- 赤ちゃんのミルクづくりに



酸性水

美容の水

弱酸性の健康なお肌にする美容水にも。

- 麺の茹で水や天ぷらの衣に
- 洗浄水として



強酸性水

衛生の水

食中毒を防ぐほどの優れた除菌効果が期待でき、食器・調理器具の洗浄に。

- 包丁・まな板・ふきんなどの洗浄除菌に
- 歯ブラシの除菌に
- 茶シブ落としに



強アルカリ水

環境の水

水なのに洗剤のような洗浄効果がある強アルカリ水が、毎日の暮らしの衛生を守ります。

- 換気扇やレンジフードの油落としに
- 野菜や肉・鮮魚の洗浄に
- トイレの黄ばみ落としに
- タケノコ・ワラビ・ゼンマイなどのアク抜きに
- まな板・包丁・皿の汚れ落としに
- 床や側溝のぬめり取り、汚れ落としに
- コーヒー・醤油・食用油のシミ抜きに



抗菌性能を高めた大容量のカートリッジを搭載。


ピュア・浄水

繊維活性炭、銀添活性炭が気になるカルキ臭・カビ臭はもちろん、トリハロメタン・農薬などの有害物質を除去。さらに鉛除去用の特殊フィルターにより溶解性鉛を吸着除去し、ピュアな「浄水」をお届けします。

浄水処理能力

業界トップクラスの浄水処理能力30トンと長寿命対応。

総通水量によるカートリッジ交換時期と使用時間を検出し、適切な交換時期を大型液晶パネルと音声案内でお知らせします。

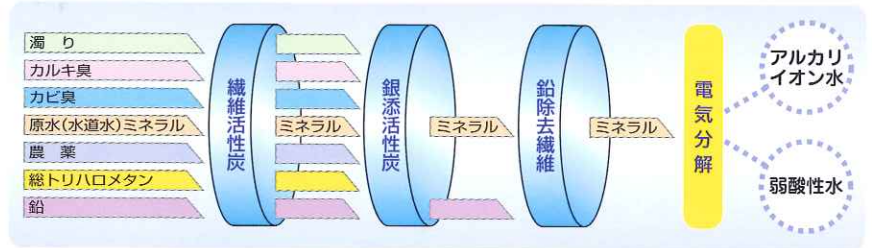

3大特徴。

安定した電解力

大容量トランスの採用により、様々な水質に対応。水量が変化してもタッチパネルに設定した電解力を自動制御してくれます。さらに自動洗浄機能搭載により安定した電解力を維持し、手間いらずです。

高性能・ハイパワー電解槽を搭載・酸化還元電位-750mvを実現

業界トップクラスの電解性能により-750mv前後の酸化還元電位をもつアルカリイオン水を生成します。



※酸化還元電位の値は原水、通水量などにより異なり、製品の保証値ではありません。

大型液晶パネル・音声案内で簡単・親切設計

- 動作状態が一目でわかる大型液晶パネルを採用。ご希望の電解水をタッチパネルで選択、あとは蛇口をひねるだけで、水質を気にせず選択したpHレンジに対応した電解水を安定して生成します。
- 音声によるお知らせ機能で親切案内「まもなくカートリッジ交換時期です」「カートリッジを取り付けてください」「水量を下げてください」etc. 酸性水使用時や捨て水終了合図をアラームでお知らせします。





1wayタイプ



医療機器 認証番号
219AGBZX00006A04



2wayタイプ

製品仕様

類別	機械器具(83) 医療用物質生成器
一般的名称	連続式電解水生成器 (JMDNコード71024000)
医療機器分類	管理医療機器
販売名	アクアフレンズ
型式	AF-4000
本体寸法/重量	1way 高さ361mm×幅260mm×奥行120mm/約6kg(乾燥重量) 2way 高さ336mm×幅260mm×奥行120mm/約6kg(乾燥重量)
電源電圧/定格電流	AC100V/2.8A 50/60Hz
最高使用水温	約40℃
使用水道圧範囲	0.1MPa~0.59MPa (1.0~6.0kgf/cm ²)
給水仕様/給水接続	吐水蛇口分岐式・分岐水栓セット
給水水质	飲用適の水(水道法基準)
吐水方式	1way フレキ吐水口 / 2way 分岐水栓(Uターン方式)
操作方法	押しボタンスイッチ
電解方法	連続式隔膜電解方式
電解	[処理水量] 最大6.0L/分 [電解能力切替] 6段階(浄水・アルカリ1、2、3・強電解・酸性) [電解槽] リバーシブル電極 [電極材質] チタン電極+プラチナコーティング [電解槽洗浄] オートクリーニング方式/手動洗浄 [連続使用可能時間] 約1時間
浄水能力(注1)	遊離残留塩素 30t 総トリハロメタン 12t CAT(農薬) 15t 2-MIB(カビ臭) 15t 溶解性鉛 15t
ろ過材料	銀添粒状活性炭・繊維活性炭・イオン交換繊維
カートリッジ交換案内	29.5tで交換予告/30tで交換案内(音声・液晶表示) カートリッジ交換後 1年半経過でも交換案内
カートリッジ交換方式	ワンタッチ回転脱着方式
カルシウム添加	強制溶解型添加方式(電解補助剤として)
電源保護装置	電流ヒューズ
過昇温度保護装置	温度センサー・温度ヒューズ
過電流検出	電解能力自動切替
消耗品	浄水器カートリッジ、グリセロリン酸カルシウム、pH試薬、手動洗浄用添加剤(塩)

(注1) JIS S 3201試験による除去率80%の値。水质・水圧によって異なります。

標準価格 386,400円(税込)
368,000円(税別)
※取付工事費別途

交換用浄水カートリッジ
標準価格 15,540円(税込)
14,800円(税別)

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

- 注意 安全のために必ずお守りください。**
- アルカリ水を飲用するときには、次のことに注意して下さい。医薬品をアルカリ水で飲用しないでください。腎不全、カリウム排泄障害などの腎疾患の方は飲用しないでください。飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状が改善が見られないときは、飲用を中止し、医師に相談してください。
 - 水道法の水質基準に不都合な原水は処理できません。
 - 地域によって塩素除去能力に多少の差があります。
 - 次のような方はご使用前に医師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている方
 - (2) 持病のある方または身体の弱っている方
 - (3) 腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方

- 初めてご使用になる場合・「アルカリ1」より少量ずつ(コップ1~2杯)2週間程度アルカリ水に慣れていただき、順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。
- 下痢や発疹などの症状が出た場合・飲用を中止し、医師にご相談ください。

- ご使用上の注意**
- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 - 硬水を軟水に変えることはできません。
 - 本器は日本国内の飲用可能な水を対象としております。

■お問い合わせ・お求めは...

■製造元 株式会社アルテック ISO9001 認証取得